



Anwendungsempfehlung für Reinigungspulver

Bitte vor Gebrauch die Anwendungsempfehlung vollständig lesen.

Wir empfehlen folgende Anwendung:

1. Es sollte ausschließlich folgendes Programm benutzt werden:

Segment 1: 100°C pro Stunde auf 1500°C Zieltemperatur

Segment 2: Haltezeit von 2 Stunden bei 1500 °C

Segment 3: Ende

2. Bei den Ofenmodellen S1 Plus und P1 Plus /P1 Color sind alle Brennhilfsmittel aus dem Ofen zu entfernen.

Bei den Ofenmodellen M2 Plus, Rubin und R2 ist ausschließlich die 12-Kant-Platte im Ofen zu lassen.-

3. Als nächstes wird eine alte Keramik-Auflage, falls vorhanden, mit einer Dicke von 2mm in den Ofen gelegt.

Folgende Keramik-Auflagen werden empfohlen:

Rubin: Keramik-Auflage, Kreis, 120 x 2mm (Artikel-Nr.7.015.0030)

R2: Keramik-Auflage, Kreis, 120 x 2mm (Artikel-Nr.7.015.0030)

M2 Plus: Keramik-Auflage, Kreis, 140 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0020)

P1 Plus: Keramik-Auflage, eckig, 70 x 100 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0010)

S1 Plus: Keramik-Auflage, eckig, 70 x 100 x 2mm (Artikel-Nr. 7.015.0010)

Bei den Ofenmodellen S1 Plus und P1 Plus/P1 Color wird die Keramik-Auflage auf den Brennträger gelegt.

Bei den Ofenmodellen M2 Plus, Rubin und R2 wird die Keramik-Auflage auf die 12-Kant-Platte gelegt.

Wichtig: Das Pulver darf auf keinen Fall ohne Unterlage in den Ofen gegeben werden!

4. Nun wird ca. ein Drittel des von uns gelieferten Reinigungspulver auf der Keramik-Auflage verteilt.

5. Anschließend kann das Programm gestartet werden.

6. Nach Programmende das benutzte Pulver entsorgen.

Wichtig: Bitte auf keinen Fall mehrfach verwenden!

Die hierfür verwendete Keramik-Auflage kann für weitere Reinigungsbrände benutzt werden, jedoch nicht mehr zum Sintern von gefrästen Arbeiten, da sich das Reinigungspulver teilweise auf der Keramik-Auflage dauerhaft ablagert.

Der Reinigungsbrand muss eventuell mehrfach wiederholt werden. Zum Feststellen einer Verbesserung empfehlen wir, bei jedem Brand ein sauberes, weißes, nicht eingefärbtes Stück Zirkon zu dem Pulver auf der Keramik-Auflage zu legen.

Die Reinigung ist abgeschlossen, wenn das Stück Zirkon keinerlei Verfärbungen mehr aufweist.