

# Denta-Star Rubin

## Stör- und Systemmeldungen

| Störung / Systemmeldung      | mögliche Ursache  | Maßnahmen  |
|------------------------------|---|--|
| Alle Programmtasten blinken  | Überhitzungsschutz hat ausgelöst<br>Lüfter defekt<br>Wackelkontakt am Thermoelement | Überhitzungsschutz prüfen (Bi-Metall)<br>Lüfter prüfen, ggf. tauschen<br>Thermoelement Anschlüsse reinigen |
| Sbr im Display (Sensorbruch) | Thermoelement defekt<br>Ausgleichsleitung defekt                                    | Thermoelement prüfen/ austauschen<br>Ausgleichsleitung prüfen/ austauschen                                 |



**Thermo-Star GmbH**

Krantzstr. 7 / Gebäude 37  
52070 Aachen, Germany



+49 241 60845-0



+49 241 60845-100



info@thermo-star.de



www.thermo-star.de

